

## GENÉTICA MÉDICA

### INSTRUÇÃO DE TRABALHO IT.04.1 | INSTRUÇÃO DE COLHEITA E ENVIO DE AMOSTRAS

#### Instruções de colheita e envio de amostras

1. Identificar, de forma inequívoca, cada tubo com nome e data de nascimento;
2. Efetuar as colheitas em condições de estrita esterilidade, de preferência em tubos de vácuo;
3. Colher cerca de 5mL de sangue em 1 ou mais tubos estéreis com EDTA;
4. Para colheitas em crianças menores de 10 anos, colher cerca de 3mL de sangue;
5. Para envios de amostras de DNA: concentração mínima de 50 ng/ $\mu$ l e volume de 100  $\mu$ l;
6. Manter as amostras à temperatura ambiente e enviar num prazo que não deverá exceder as 72 horas de modo a não comprometer a realização do teste genético;
7. A amostra deverá ser devidamente acondicionada e colocada na embalagem para envio contendo a amostra e documentos essenciais para a realização do teste (folha de pedido de teste genético, com identificação pessoal, informação clínica e familiar, assim como os termos de consentimento apropriados).

#### Morada para envio das amostras

##### Genetyca-ICM

Avenida da Boavista, 2121 salas 102 e 103  
4100-134 PORTO

##### **Em caso de dúvida, por favor, contacte-nos:**

Tel.: 223 211 454

Patrícia Oliveira – 914 733 730

Susana Gilbert – 913 540 896

Ana Gomes – 916 427 740

Email: [info@genetyca-icm.com](mailto:info@genetyca-icm.com)